

Datum poslední revize textu: duben 2019  
www.DJGlobal.com  
F +1760.734.4712  
T +1760.727.1280  
USA  
Mesa CA 92081-8553  
1430 Decision Street  
DJO, LLC

MSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



## Arm Sling

ZÁVĚS NA PAŽI

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROŠÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Znehybnění a podpora paže a ramenního a loketního kloubu.

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře. Závěs nenoste přes otevřenou ránu.

### POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Umístěte loket do kapsy v závěsu. Zápěstí a ¾ dlaně musí ležet uvnitř kapsy.
2. Pokud má kapsa v závěsu smyčku pro palec, můžete vložit palec do této smyčky a udržovat tak lépe polohu předloktí v závěsu.
3. Umístěte ramenní popruh přes protilehlé rameno, protáhněte jej skrz sponku a zajistěte. Dlaň by měla být lehce zdvižena nad úroveň lokte.

**Poznámka:** Délku nosné části univerzálního pažního závěsu je možné v případě potřeby zkrátit složením otevřeného konce do sebe a zajištěním pomocí suchého zipu. Závěs nasaďte pomocí níže uvedených pokynů.

### ÚDRŽBA:

Vnitřní vložku perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

**Poznámka:** Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbylé mýdlo může způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálů.

### SLOŽENÍ:

Polyetylénsulfón, nylon, spandex, polyamid, polyuretán, bavlna, polyester, plast (acetal a PVC), syntetická guma (SBR/CR)



NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

