



MaxTrax™ Diabetic



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Určeno pro náhradu sádry při léčbě ulcerací a preulcerací na plosce nohy. Mírná až středně závažná fasciitida. Pooperační léčba Charcotovy nohy. Onemocnění plosky nohy vyžadující nebo profitující z rovnoměrného rozložení váhy na chodidlo. Jiné stavy, jejichž léčbu doporučí lékař.

KONTRAINDIKACE:

- Těhotenství a onemocnění oběhového, plicního, kardiovaskulárního nebo pohybového systému, u kterých existuje riziko, že dojde k jejich zhoršení následkem stlačení a/nebo tlaku. Jsou-li přítomny deformity kostí nohy, jako například konzervativně léčená Charcotova noha a jiné abnormality, při kterých dochází k výrazným odchýlkám ve tvaru nohy od fyziologických poměrů. Patologie nohy vyžadující podporu kostních struktur.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tato pomůcka je určena pro jednoho pacienta. Není určena pro pacienty, jejichž váha přesahuje 135 kg. Není určena k prevenci úrazů nebo snížení či eliminaci rizika opakovaného poranění. Zabraňte kontaktu bosého chodidla s vložkou ortézy. Během užívání noste ponožku, aby kůže mohla dýchat. Pacient, rodinný příslušník nebo zdravotnický pracovník by měl před a po každém použití ortézy nohu zkontrolovat. Pokud se na noze objeví začervenalé zanícené oblasti, vředy a bolestivá nebo mokvající místa, ihned se obraťte na svého lékaře. Tato pomůcka je vydávána pouze na předpis. Tato pomůcka je určena k léčbě diabetických vředů. Rány, které se nacházejí na krajích kontaktní plochy chodidla, je nutné pečlivě sledovat a zajistit, aby na nich nespočíval tlak. Odnímatelná vložka NESMÍ být použita spolu s jakoukoli jinou ortézou než s DJO ortézou s platformou MaxTrax Diabetic. Ortézu nesundávejte, dokud vám k tomu lékař nedá pokyn. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

PŘÍPRAVA:

- Pamatujte na vhodné a pečlivé ošetření a krytí plantárních vředů.
- Přes nohu s krytím si navlékněte ponožku.

NASAZENÍ ORTÉZY:

- Vyjměte modrou pěnovou podložku z ortézy. Podložku umístěte modrou stranou proti chodidlu pacienta a vyhledejte a odstraňte pěnové kostky ze spodní části pěnové podložky v místech, kde se na plosce nachází rány a vředy. Vraťte modrou pěnovou podložku zpět na původní místo pod vložkou ortézy.
- Umístěte nohu do vložky a vložku zajistěte pomocí suchého zipu. Ujistěte se, že pata pohodlně sedí v zadní části vložky. Nejprve upevněte vložku kolem nártu, následně kolem dolní části bérce. Ujistěte se, že vložka v celém rozsahu pohodlně sedí a že proti kůži nevyčnívají žádné ostré hrany nebo záhyby.
 - Součástí každé ortézy jsou dvě volitelné svislé podložky, které představují doplňkové vypodložení oblastí kolem svislých kovových výztuh. Poté, co je distální část dolní končetiny uložena ve vložce, umístěte na každou stranu vložky jednu podložku tak, aby podložka směřovala ke vložce hrubou částí suchého zipu (s háčky). Ujistěte se, že jsou podložky zarovnaný s osou dolní končetiny. Horní část podložek musí být zarovnána s horní částí vložky.
- Obě výztuhy je možné zkrátit až o 5 cm tak, aby ortéza seděla pacientům různé výšky. **(Obr. 3)**
 - Zkrácení výztuh:** Přidržte výztuhy na hraně stolu nebo jiného pevného povrchu. Silně zatlačte v místě, kde chcete výztuhu zkrátit. V horní části vložky jsou umístěny pásky se suchými zipy Velcro®. Podle potřeby je možné po zkrácení výztuh připevnit pásky k horním částem výztuh nebo vložku ohnout přes výztuhu, čímž zajistíte větší pohodlí a ortéza bude lépe sedět. (Obr. 3)

- Součástí každé ortézy je podložka pro prsty. Připevněte podložku pro prsty tak, že nadzdvihnete vložku a podložku připevníte pomocí suchého zipu. Poté vraťte vložku na své místo.
- Rukama roztáhněte výztuhy od sebe, umístěte nohu do ortézy a výztuhy zarovnejte s osou kotníku. Sejměte plastová pouzdra z výztuh a připevněte vložku. Výztuhy je možné ohnout tak, aby odpovídaly jakémukoli tvaru dolní končetiny.
- Dva kotníkové popruhy je možné přizpůsobit tak, aby odpovídaly individuálním potřebám pacienta. **Předtím, než upevníte vnější popruhy, zvolte si jeden ze způsobů jejich upnutí. Převedení na zapínání kotníkových popruhů zkříženě:** Obr. 6a) Popruh č. 3 je odnímatelný a upevníte ho provlečením skrz plastovou sponu umístěnou na druhostranné výztuze. Obr. 6b) Přejete-li si zapnout kotníkové popruhy zkříženě, provlékněte popruh č. 3 skrz plastovou sponu umístěnou na protější straně nártu. Překřížte popruh č. 3 přes popruh č. 2, provlékněte jej skrz plastovou sponu umístěnou na druhostranné výztuze a upevněte jej. Zapněte všechny zbylé popruhy, začněte u prstů a postupujte směrem nahoru.

ÚDRŽBA:

- Vložku, modrou pěnovou podložku a ostatní podložky perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku nebo je otřete navlhčeným hadříkem. Sušte volně na vzduchu. Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbylé mýdlo může způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

SLOŽENÍ:



NEOBSAHUJE LATEX

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

