

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Znehybnění kolenního kloubu.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře. Ortézu nenoste přes otevřenou ránu.

POKYNY K NASAZENÍ:

UMÍSTĚNÍ ORTÉZY:

1. Zadní výztuže vycentrujte v popliteální krajině (oblast podkolenní jamky).
2. Boční panely umístěte do požadované polohy. Boční výztuže by měly být zarovnaný s osou končetiny. Otvor pro česku umístěte na střed kolena.
3. Pásky provlékněte plastovými sponkami a utáhněte je. Je nutné, aby pásky byly utažené, ne však tolik, aby omezovaly krevní oběh v noze.

Poznámka: Pěnová podložka je součástí pomůcky pro znehybnění kolenního kloubu a může být použita ke zvýšení pohodlí a zabránění sklouzávání ortézy po končetině. Pokud není pěnová podložka nasazena na ortéze, přečtěte si následující pokyny pro její nasazení:

Umístění pěnové podložky: Položte podložku doprostřed zadní části znehybnějícího panelu. Podložka musí přesahovat ohyb panelu. Odstraňte lepicí část ze zadní části podložky a přiložte ji k vnitřní straně znehybnějícího panelu. Podložka může přispět ke zvýšení pohodlí a poskytnout podporu v oblasti za kolenem.

ÚDRŽBA:

Podložku perte ručně v teplé vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálů. Z pomůcek pro znehybnění kolena s vyměnitelnými výztužemi před praním výztuže vyjměte.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu částí nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálů nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM POMŮCKY SI POZORNE PŘEČÍTAJTE VSETKY NASLEDUJUCE POKYNY. NA SPRÁVNŮ FUNKCIU POMŮCKY JE NEVYHNUTNÉ JEJ SPRÁVNE POUŽITIE.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Znehybnenie kolenného kľubu.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY:

- Poskytuje znehybnenie alebo regulovaný pohyb končatiny alebo časti tela.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak pri používaní tohto produktu pocítite bolesť, opuch, vnemové zmeny alebo akékoľvek nezvyčajné reakcie, okamžite sa obráťte na svojho lekára. Ortézu nikdy nezakladajte na otvorené rany.

Nepoužívajte na otvorené rany.

Pomôcku nepoužívajte, ak je poškodená.

Poznámka: V prípade závažného incidentu súvisiaceho s používaním tejto pomôcky sa obráťte na výrobcu a kompetentný úrad.

Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

13-1386-0-00000 REV D

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY

3-panel knee splint

ORTÉZA POOPERAČNÍ KOLENNÍ, FIXACE V EXTENZI

3-PANELOVÁ POMŮČKA NA ZNEHYBNĚNIE KOLENA

DJO

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ:

Poznámka: Penová podložka je súčasťou pomôcky na znehybnenie kolena a môže sa používať na zvýšenie pohodlia a na zabránenie pohybu. Ak sa penova podložka nenachádza na dlahe, prečítajte si nasledujúce pokyny na jej umiestnenie.

Umiestnenie penovej podložky: Položte podložku na stred nad výstužami, ktoré sa nachádzajú na zadnom paneli pomôcky na znehybnenie. Podložka musí byť vo výstužiach a nad ohybom. Odstráňte zadnú lepiacu časť podložky a položte ju na vnútornú stranu pomôcky na znehybnenie kolena. Podložka zvýši pohodlie a poskytne oporu v oblasti za kolénom.

UMIESTNENIE DLAHY:

1. Zadné výstuže vycentrujte v zákolennej oblasti.
2. Bočné panely umiestnite do požadovaného popruhu. Výstuže na oboch stranách panelov by mali byť zarovnané so stredovou čiarou nohy. Vyrez pre koleno jablčko vycentrujte na kolene.
3. Popruhy prevlečte cez krúžky v tvare D a zaisťte. Popruhy musia tesne priliehať, ale nesmú stahovať.

POKYNY NA ČISTENIE:

Vložku perte v rukách v teplej vode s jemným mydlom a dôkladne opláchnite. **SUŠTE NA VZDUCHU**

Poznámka: Pri nedostatočnom opláchnutí môžu zvyšky mydla spôsobiť podráždenie a poškodenie materiálu. Pri pomôckach na znehybnenie kolena s vymeniteľnými výstužami pred praním vyťahnite výstuže.

ZLOŽENIE:

 **Pri výrobe nebol použitý prírodný gumový latex**

LEN NA POUŽITIE U JEDNÉHO PACIENTA.

ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja pre mäkké časti a jeden rok od dátumu predaja pre rám/kilbové spoje ortézy.

OZNÁMENIE: HOCI BOLO VYNALOŽENÉ MAXIMÁLNE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE ČO NAJVVYŠŠEJ FUNKČNOSTI, PEVNOSTI, ODOLNOSTI A POHODLIA A BOLI POUŽITÉ NAJMODERNEJŠIE DOSTUPNÉ METÓDY, NEMOŽNO ZARUČIŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU NEDÔJDE K ZRANENIU.

