

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Kotníková ortéza Aircast A60 je určena pro podporu a ochranu kotníku.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Navlékněte si ponožku.
- Uvolněte pásek z černé plastové sponky, rozepněte horní manžetu a ortézu otevřete.
- Vložte nohu prsty napřed do horní části ortézy.
- Vytáhněte výztuhy ortézy směrem nahoru a zarovnejte je s kotníky.
2. Omotejte manžetu kolem horní části kotníku a zajistěte ji.
3. Provlékněte konec pásku do černé plastové sponky.
- Ohněte koleno tak, aby bylo v rovině nad prsty nohy.
- V této pozici utáhněte pásek, aby těsně přiléhala a zajistěte jej.

ÚDRŽBA:

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Sušte volně na vzduchu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE:

- Liečba akútnej alebo chronickej bolesti spodnej časti chrbta; bedrovej ischias.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Obuďte si ponožku.
- Uvoľnite popruh z čierneho plastického krúžku, otvorte horné uzávery a otvorte ortézu.
- Vložte nohu do zadnej časti ortézy, najprv palec.
- Vytiahnite stabilizátory ortézy smerom nahor a zarovnajajte ich s bokmi členku.
2. Omotajte uzávery okolo hornej časti členku a upevnite.
3. Zasuňte koniec popruhu do čierneho plastického krúžku.
- Ohnite koleno a nastavte cez prsty.
- Zatiahnite popruh a upevnite koniec popruhu na hlavnú časť popruhu.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Perte ručne vo vlažnej vode pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

ZLOŽENIE:



Neobsahuje prírodný gumový latex.

13-6328 REV C
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDS5 GmbH



DONJOY

A60™ Ankle Brace

KOTNÍKOVÁ ORTÉZA A60

ČLENKOVÁ ORTÉZA A60

DJO

UPOZORNENIE:

Tento výrobok obsahuje prírodný gumový latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNENÉ PORANENIU.

