

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMOŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMOŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Akutní nebo chronické bolesti zad v lumbosakrální oblasti; bederní ischias (zánět sedacího nervu).

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tato pomůcka je určena pouze pro jednoho pacienta. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

Ujistěte se, že jste zvolili vhodnou velikost pásu, abyste docílili maximální účinnosti léčby. Upevněte postranní elastické pásky tak, aby byl pás dostatečně utažen.

1. Nasadíte si podpůrný pás kolem pasu a upevníte jej pomocí suchého zipu.
2. Zatáhnete za postranní elastické pásky a utáhněte tak bederní pás na požadovanou úroveň. Postranní pásky upevněte na přední straně bederního pásu pomocí suchého zipu.

Odmíratelná lumbální silikonová vložka je součástí balení ActiStrap+ (kód 82-0232-x).

ÚDRŽBA:

Ortézouerte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte bělicí prostředky. Pečlivě opláchněte. Sušte volně na vzduchu, nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Ortézu nežehlete.

SLOŽENÍ:

Polyamid, polyester, PVC, přírodní kaučuk (latex), elastan, ocel



OBSAHUJE PŘÍRODNÍ KAUKČUK (LATEX), KTERÝ MŮŽE VYVOLAT ALERGICKÉ REAKCE

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

oznámění: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TEJTO POMOŮCKY SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNÉ NASADENIE POMOŮCKY JE NEVYHNUTNÉ PRE JEJ OPTIMÁLNE FUNKČOVANIE.

SPÔSOB POUŽITIA A INDIKÁCIE:

Akútne alebo chronické bolesti spodnej časti chrbta; bedrový ischias.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne kontraindikácie nie sú známe.
- Pre dosiahnutie maximálneho účinku je nutné zvoliť si vhodnú veľkosť a prispôbiť bočné ťahy tak, aby vyvíjali požadovaný tlak.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimni ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Priložte bedrovú ortézu okolo drieku a uzavrite ju vpredu pomocou suchého zipsu.
2. Zatiahnite bočné elastické ťažné popruhy na požadovanú úroveň tlaku a prichyťte ich o opasok veľkropáskami.

NÁVOD NA ČISTENIE:

Perte vo vlažnej vode pomocou jemného čistiacieho prostriedku. Nesmie sa bieliť. Dôkladne vypláčajte a nechajte uschnúť na vzduchu. Nesušte v sušičke. Nesmie sa čistiť chemicky. Nesmie sa žehliť.

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE:

Polyamid, polyester, PVC, guma, elastan, oceľ



UPOZORNENIE: TENTO VÝROBK OBHAHUJE PŘÍRODNÍ GUMOVÝ LATEX, KTORÝ MŮŽE VYVOLAT ALERGICKÉ REAKCIE.

13-8592 REV.C
Datum poslednéj revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com
F +1760.734.4712
T + 1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street
DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41
MDSS GmbH



ActiStrap™, ActiStrap+™

LUMBOSAKRÁLNI PODPORA
BEDROVO-KRÍŽOVÁ OPORA



LEN NA POUŽITIE U JEDNÉHO PACIENTA.

ZÁRUKA: Spoločnosť DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu chyby materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja pre mäkké časti a jeden rok od dátumu predaja pre rám/kibové spoje ortézy.

OZNÁMENIE: HOCI BOLO VYNALOŽENÉ MAXIMÁLNE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE ČO NAJVVYŠŠEJ FUNKČNOSTI, PEVNOSTI, ODOLNOSTI A POHODLIA A BOLI POUŽITÉ NAJMODERNEJŠIE DOSTUPNÉ METÓDY, NEMOŽNO ZARUČIŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU NEDÔJDE K ZRANENIU.

