

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

POPIS VÝROBKU:

- Semi-rigidní krční límec – střední podpora.
- Trojcestný bavlněný úplet s polystyrenovými mikrokuličkami a odnímatelnou plastovou výztuží.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Poranění měkkých tkání krku
- Whiplash poranění (opěrkový syndrom)
- Poranění krční páteře
- Pohodlný semi-rigidní límec vhodný u bolestivého zborcení obratlů pro pacienty, kteří nejsou indikováni k nošení plněrigidního krčního límce

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VELIKOSTI A MÍRY:

Obvod krku:

S 27–34 cm

M 31–38 cm

L 35–42 cm

POKYNY K NAsAZENÍ:

K dosažení adekvátní účinnosti a podpory je možné mikrokuličky posouvat, aby límec pohodlně seděl.

1. Vymějte plastovou výztuž z krčního límce.
2. Posuňte mikrokuličky v kroužcích límce tak, abyste posílili pevnost límce v místech, která vyžadují větší podporu.
3. Umístěte plastovou výztuž kolem krčního límce.
4. Nasadte si límec kolem krku a upevněte jej pomocí suchého zipu.
5. V případě potřeby opakujte kroky 1–4 dokud nezajistíte adekvátní podporu.

ÚDRŽBA:

Perte ručně v teplé vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. Sušte na vzduchu. Nesušte v sušičce a nepoužívejte bělicí prostředky.

SLOŽENÍ:

Úplet 100% bavlna

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POHODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

TYP PRODUKTU

Semirigidný krčný golier – stredná opora

VLASTNOSTI

- 3-kanálový bavlnený obal s polystyrenovými mikrolíštami a odstrániteľnou plastickou výstužou

INDIKÁCIE

- Poškodenie mäkkých tkanív krku
- Poranenie pri jazde automobilom
- Krčné poranenia
- Pohodlná semirigidná opora pri bolestivých komprimovaných stavcoch u pacientov, ktorý nemôžu nosiť úplne rigidnú oporu

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

13-2816 REV B

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY®

Adams Collar

ANATOMICKÝ KRČNÍ LÍMEC S ODNÍMATELNOU VÝZTUHOU A MIKROKULIČKAMI
KRČNÝ GOLIER

DJO

VEĽKOSTI A A ROZMERY

Obvod krku:

S 27–34 cm

M 31–38 cm

L 35–42 cm

NÁVOD NA POUŽITIE

Adekvátna účinnosť a opora sa môže dosiahnuť posunutím mikrolíšt do vhodnej polohy.

1. Z krčného goliera vyberte plastickú rigidnú výstuž.
2. Pohnite mikrolíšty nachádzajúce sa v krčných kruhoch goliera tak, aby bolo zaťaženie vhodne umiestnené na oblasť potrebujúcu extra oporu.
3. Umiestnite plastickú rigidnú výstuž okolo goliera.
4. Umiestnite golier okolo krku a uzavrite pomocou kontaktných uzáverov.
5. V prípade potreby zopakujte kroky 1–4 tak, aby sa dosiahla adekvátna opora.

ÚDRŽBA

- Perte ručne v studenej mydlovej vode a poriadne prepláchnite. Sušte na vzduchu. Nesušte v sušičke ani nepoužívajte bieliadlo.

ZLOŽENIE

Úplet 100% bavlna

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKOHDLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

