

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza Aircast Air Sport™ je určena pro podporu a ochranu zdravého kotníku.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKyny K NASAZENÍ:

1. Navlékněte ponožku. Uvolněte pásky a otevřete ortézu. Zasaňte nohu do zadní části ortézy. Vytáhněte postranní části ortézy nahoru a srovnějte je po stranách kotníku.
2. Upevněte pásek pro podporu Achillovy šlachy zezadu kolem kotníku a pevně jej utáhněte.
3. Utahujte překřížující přední talofibulární pásek (ATF pásek), dokud není pevně zajištěn, a omotejte jej zezadu kolem kotníku. Nazuňte přes ortézu zavazovací botu nebo tenisku.

Chcete-li nasazenou ortézu upravit, utáhněte nebo povolte překřížující přední talofibulární pásek (ATF).

ÚDRŽBA:

- Celou ortézu je možné prát ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku. Sušte volně na vzduchu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKHDLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Aircast Airsport™ má zabezpečiť oporu a ochranu zdravého členku.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimni ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Obuňte si ponožku. Odopnite popruhy a otvorte ortézu. Vložte nohu do zadnej časti ortézy, najprv palec. Vytiahnite vložky ortézy smerom nahor a zarovnajtie ich s bokmi členku.
2. Omotajte Achillov popruh okolo zadnej časti členku a jemne upevnite. Zatiahnite priečny popruh ATF.
3. Omotajte okolo zadnej časti členku a jemne upevnite. Obuňte si topánku alebo tenisku.

Upravte utiahnutím alebo uvoľnením priečneho popruhu ATF.

ÚDRŽBA

- Celá ortéza Aircast sa môže čistiť vo vlažnej vode s mydlom a sušiť na vzduchu.

ZLOŽENIE



Neobsahuje prírodný gumový latex

© 2021, DJO, LLC
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021
02M100 REV E

www.DJOglobal.com
F +1 760.734.4712
T +1 760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street
DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



AirSport™ Brace/AirGo

ORTÉZA HLEZENÍ S PNEUMATICKÝM VYPODLOŽENÍM
ČLENKOVÁ ORTÉZA AIRSPORT™



URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

