

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Omezuje flexi, extenzi a rotaci krční páteře a tím napomáhá uzdravení pacienta.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Nejříve vyberte vhodnou velikost límce. Poté položte ZADNÍ díl límce ze zadu na krk. Límec musí být umístěn ve středu a přední šípka by měla směřovat nahoru.
2. Položte PŘEDNÍ díl límce zepředu na krk tak, aby brada byla zajištěna v prohlubni. Límec vyrovnajte na střed. PŘEDNÍ díl límce se musí kryt se ZADNÍM dílem.
3. Pro zajištění límce obtočte popruhy vystupující ze ZADNÍHO dílu kolem PŘEDNÍHO dílu. Nastavením popruhů po obou stranách dosáhnete znehybnění a zajistíte pohodlné nošení.
4. Podle potřeby můžete pro pohodlnější nošení nasadit na PŘEDNÍ a ZADNÍ díl límce pružnou bavlněnou tkaninu.

ÚDRŽBA:

Perte ručně v teplé vodě s použitím jemného čisticího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM TEJTO POMŮCKY SI POZORNE PŘEČÍTAJTE NÁSLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNÉ NAsADENIE POMŮCKY JE NEVYHNUTNÉ PRE JEJÍ OPTIMÁLNÉ FUNKOVANIE.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Obmedzuje ohyb, natiahnutie a otáčanie krčnej chrbtice, čím uľahčuje uzdravenie pacienta.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak počas používania tohto produktu pocítite akúkoľvek bolesť, opuch, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ:

1. Najskôr vyberte vhodnú veľkosť. Potom položte ZADNÝ dieliec goliera na zadnú časť krku pacienta. Golier musí byť v strede a predná šípka by mala smerovať nahor.
2. Položte PREDNÝ dieliec goliera na prednú časť krku pacienta tak, aby bola brada zaisťovaná v priehlbni. Golier vyrovnajte na stred. PREDNÝ dieliec goliera sa musí kryť so ZADNÝM dielcom.
3. Na zabezpečenie goliera obtočte popruhy vystupujúce zo ZADNÉHO dielca okolo PREDNÉHO dielca. Jemným nastavením popruhov po oboch stranách dosiahnete znehybnenie a zaisťujete pohodlné nosenie.
4. Podľa potreby môžete v záujme pohodlného nosenia použiť na prednom a zadnom dielci goliera pružnú pletenú bavlnenú tkaninu.

POKYNY NA ČISTENIE:

Perte ručne v teplej vode s jemným mydlom. Dôkladne opláchnite. SUŠTE samostatne NA VZDUCHU.



Neobsahuje prírodný gumový latex

Datum posledního revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



California® Tracheotomy Collar / Philadelphia Tracheotomy Collar

KRČNÍ LÍMEC CALIFORNIA / KRČNÍ LÍMEC PHILADELPHIA

KRČNÝ GOLIER CALIFORNIA / KRČNÝ GOLIER PHILADELPHIA

Germany

30175 Hannover

Schiffgraben 41

MDSS GmbH



URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: TENTO VÝROBK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ POD DOHĽADOM LEKÁRA. TÁTO POMÔCKA NIE JE URČENÁ NA LAICKÉ POUŽÍVANIE BEZ DOZORU. POKIAL PRI POUŽITÍ TOHTO VÝROBKU POCIŤUJETE AKÚKOLVEK BOLEŠŤ, OPUCH, ZMENY CITLIVOSTI ALEBO AKÉKOLVEK NEOBÝVKÉ REAKCIE, OKAMŽITE TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM.

