

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Krční límec pomáhá ulevit od bolesti způsobené namožením nebo poraněním krku.

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Límec by měl těsně přiléhat ke krku, ale neměl by být příliš utažen a způsobovat tím útlak, bolest nebo problémy s dýcháním či polykáním.

**Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.**

### POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Nasadte límec kolem krku penovou výtuzí směrem ke kůži. Ujistěte se, že brada pohodlně sedí v konturách penové výtuzě.
2. Zajistěte límec vzadu na krku pomocí suchého zipu.

### ÚDRŽBA:

Ortému perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Sušte volně na vzduchu.

### SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex.

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ:** PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

## SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

### URČENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE:

- Krčný golier pre úľavu od bolesti spôsobenej presilením, alebo poranením.

### KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

### VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

**Golier by mal byť tesný, avšak nie natoľko, aby spôsoboval nadmerný tlak, bolesť, alebo ťažkosti s dýcháním alebo prehítaním.**

**Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.**

### NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Nasadte golier na krk s penovou stranou na pokožku. Uistite sa, že brada sedí pohodlne v konturách goliera.
2. Zaisťte golier vzadu na krku suchým zipsom.

### POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Perte ručne vo vlažnej vode pomocou jemného čistiacieho prostriedku. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

**Poznámka:** Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

### ZLOŽENIE:



Neobsahuje prírodný gumový latex.

### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

Datum poslednéj revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

13-3516 REV D

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T +1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany  
30175 Hannover  
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



## Cervical Collar

KRČNÍ LÍMEC

KRČNÝ GOLIER



**UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI  
TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY  
FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN  
JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM  
ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE  
PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁŇENÉ PORANENIU.**