

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Znehybnění a podpora paže a ramenního a loketního kloubu.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře. Závěs nenoste přes otevřenou ránu.

POKYNY K NASAZENÍ:

1. Umístěte loket do kapsy v závěsu. Zápěstí a $\frac{3}{4}$ dlaně musí ležet uvnitř kapsy.
2. Pokud má kapsa v závěsu smyčku pro palec, můžete vložit palec do této smyčky a udržovat tak lépe polohu předloktí v závěsu.
3. Umístěte ramenní popruh přes protilehlé rameno, protáhněte jej skrz sponku a zajistěte. Dlaň by měla být lehce zdvižena nad úroveň lokte.

Poznámka: Dílku nosné části univerzálního pažního závěsu je možné v případě potřeby zkrátit složením otevřeného konce do sebe a zajištěním pomocí suchého zipu. Závěs nasadte pomocí níže uvedených pokynů.

ÚDRŽBA:

Vnitřní vložku perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data předeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Znehybnenie a opora ramena, kĺbov ramena a lakťa.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

Poznámka: Dĺžka návleku univerzálného ramenného popruhu sa môže v prípade potreby skrátiť tak, že sa otvorený koniec zahne dovnútra a zaistí háčkovými a slučkovými uzávermi. Aplikujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Lakeť položte do priehradky popruhu. Zápästie a $\frac{3}{4}$ ruky musia byť podopierané v priehradke.
2. Ak má popruh slučku na palec, palec môžete vložiť do tejto slučky, aby sa udržiavala poloha predlaktia.
3. Ramenné popruhy založte na opačné rameno, prevlečte cez krúžok v tvare „D“ a zaistite. Ruka musí byť mierne nadvihnutá nad lakeť.

ÚDRŽBA

• Výstelku perte ručne v teplej vode s jemným mydlom, dôkladne opláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak nie je opláchnutie dôkladné, môže zvyšné mydlo spôsobiť podráždenie pokožky a poškodenie materiálu.

13-1347-0-00000 REV.C

Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany

30175 Hannover

Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Clinic Shoulder Immobilizer

ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU

RAMENNÝ POPRUH



ZLOŽENIE



Neobsahuje prírodný gumový latex

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽIVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

