

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Pomáhá zabránit vzniku poranění lumbosakrální oblasti včetně natažení a namožení v této oblasti. Chrání při již vzniklých poraněních. Pomáhá ke správnému držení těla při delším sezení a stání.

Pás je možné nosit pod oděvem nebo přes oděv.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Tato pomůcka je určena k nošení podle návodu, nikdy ji nenoste rozepnutou. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Umístěte výztuhu ve středu pásu nad křížovou oblast. **Poznámka:** Užší část výztuhu pásu patří směrem nahoru.
2. Natáhněte postranní části pásu směrem dopředu a zajistěte je v přední části pásu tak, aby výztuha bederní páteře dobře fungovala jako pevná opora dolní části zad.
3. Chcete-li zvýšit podporu, nejprve natáhněte stahovací popruhy z levé strany směrem doprava a zajistěte je napevno zepředu pásu. Poté natáhněte pravostranný stahovací popruh, překryjte jím levostranný popruh a zajistěte jej pomocí suchého zipu. Chcete-li snížit podporu, uvolněte postranní stahovací popruhy.

K pásu je možné připojit ramenní popruhy. Popruhy k pásu připevněte pomocí spon a upravte je tak, aby pohodlně seděly.

ÚDRŽBA:

- Pás perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PŘEČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

- Pomáhá zabrániť vzniku poranení dolnej časti chrbta, vrátane natiahnutia a výronu, a chrániť vzniknuté poranenia; napomáha správne mu držaniu tela pri dlhšom sedení a státi. Opora sa dá nosiť pod oděvom ako aj na ňom.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ortéza by sa mala nosiť podľa návodu, nikdy ju nenoste rozopnutú. Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimni ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Umiestnite oporu na stred dolnej časti chrbta.

Poznámka: Úzka strana výstuhy chrbta je vrchnou časťou výstuhy.

2. Zatiahnite pásky smerom dopredu a vpredu ich zaisťte. Zaisťte dva elastické stahovacie pásky na opasku, a tým zaisťte, aby bola výstuha bedrovej chrbtice umiestnená pevne oproti dolnej časti chrbta.

13-2976-0-00000 REV-C

Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T +1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany

30175 Hannover

Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY

ComfortForm™ Back

BANDÁŽ ZAD

BANDÁŽ CHRBTÁ

DJO

3. Aby ste dosiahli väčšiu oporu, zatahните a zaistíte sťahovací remeň najprv z ľavej strany a pripevníte ho k brušnej časti opasku. Potom pritiahните pravú stranu sťahovacieho remeňa, prekryte ľavú stranu remeňa a pripevníte suchým zipsom. Pre voľnejšiu oporu povolte bočné sťahovacie remene.

S výstuhou sa môžu používať ramenné traky (79-89350). Sponami na trakoch pripevníte traky k výstuhe. Traky upravte tak, aby sedeli a boli pohodlné.

ÚDRŽBA:

- Vyperte ručne jemným mydlom v studenej vode, dôkladne opláchnite. USUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

ZLOŽENIE

 **Neobsahuje prírodný gumový latex**

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČÍ PORANENIU.

