

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Mírná komprese kotníku.
- Doporučujeme nosit ortézu nasazenou přes sportovní ponožky.

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

**Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.**

### POKYNY K NASAZENÍ:

1. Uchopte ortézu za horní okraj a srolujte ji, čímž vytvoříte krátkou manžetu. (Obr. 1)
2. Natáhněte ortézu na kotník podle obrázku. (Obr. 2)
3. Obtočte oba pásy proti sobě kolem horní části nártu a kolem kotníku a upevněte pomocí suchého zipu. Pásy by nyní měly připomínat osmičku. Pata by měla být umístěna v kulatém vykrojení ortézy.

### ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve studené vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

**Poznámka:** Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

### SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POHODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

## SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PŘEČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

### INDIKÁCIE

Mierna kompresia členku.

### VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

**Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimni ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.**

### NÁVOD NA POUŽITIE:

Pod výrobkom by sa mala nosiť športová ponožka.

**A.** Podperu uchopte za horný okraj a oviňte dookola tak, aby sa vytvorila krátka manžeta. (Obr. 1)

**B.** Podperu nasuňte na členok tak, ako je to vyobrazené. (Obr. 2)

### Členková ortéza DoubleStrap:

**C.** Každý popruh omotajte v opačnom smere cez hornú časť nohy, okolo členka, a koniec háčka zachyťte o našitý slučkový materiál. Omotávať sa musí tak, aby sa vytvorila číslica 8.

### POUŽÍVANIE A OŠETROVANIE

Perte ručne v studenej mydlovej vode a dôkladne prepláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU.

**Poznámka:** Ak sa výrobok dôkladne neopláchne, môžu zvyšky mydla spôsobovať podráždenie pokožky a poškodenie materiálu.

### ZLOŽENIE



Neobsahuje prírodný gumový latex

### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany  
30175 Hannover  
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY

## Double Strap Ankle Support

OSMIČKOVÁ HLEZENÍ BANDÁŽ STAHOVACÍ

ELASTICKÁ PODPERA ČLENKU

DJO

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

