

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Podpora pro mírné nestabilitu vnitřních a/nebo vnějších kolaterálních vazů
- Mírná artritida
- Stav po artroskopické menishektomii
- Pocit mírné nestability kloubu

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu.

UPOZORNĚNÍ: Společnost DJO, LLC nedoporučuje nosit kolenní ortézy na pravé i levé noze současně během činností, u kterých by mohlo dojít ke vzájemnému kontaktu ortéz (např. lyžování), což by mohlo potenciálně vést ke zranění. Není doporučeno nosit ortézu přes oděv. Poradte se se svým lékařem ohledně omezení některých aktivit při nošení ortézy.

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

- A. Odepněte a uvolněte všechny pásky.
- B. Pokud používáte návlekovou ortézu, uchopte ortézu na okraje a navlékněte ji na dolní končetinu. Pokud používáte zavízací ortézu, jednoduše otočte ortézu kolem kolena a zajistěte ji v přední části dolní končetiny. Umístěte ortézu na koleno tak, aby klouby ortézy byly na stejné úrovni po obou stranách kolena a horní část kruhového vykrojení byla zarovnána s horním okrajem česky.
- C. Upevněte pásky na stehně a na lýtku.
- D. **SUNDAVÁNÍ ORTÉZY**
Ortézu sundáte rozepnutím všech pásků nebo shrnutím horního okraje ortézy směrem dolů.

ÚDRŽBA:

Ortézu perle ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. **SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.** Klouby ortézy je možné před praním vyjmout.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

Ortézu je možné používat ve sladké i slané vodě. Po použití ve vodě ortézu pořádně propláchněte čistou vodou a poté ji nechte dobře vysušit na vzduchu.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

oznámění: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POhODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

INDIKÁCIE

- Podpora pri miernom poškodení vnútorných alebo vonkajších postranných väzov
- Mierna artritída
- Postartroskopická menishektómia
- Celková ľahká nestabilita

KONTRAINDIKÁCIE

- Uvedomte si prosím, že spoločnosť DJO, LLC neodporúča súčasné používanie funkčných kolenných ortéz na oboch stranách (pravá aj ľavá končatina) počas činností (ako napr. lyžovanie), u ktorých by mohlo prísť k vzájomnému dotýkaniu sa ortéz, čo môže potenciálne viesť k zraneniu. Neodporúčame nosiť funkčné kolenné ortézy na odev.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

13-2972-0-00000 REV F
Datum posleđen revize tekstu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Drytex Economy Hinged Knee

ORTÉZA KOLENNÍ S DVOJOSÝM KLOUBEM A KOVOVÝMI DLAHAMÍ

KOLENNÁ ORTÉZA S DVOJOSÝM KLĚBOM A KOVOVÝMI DLAHAMÍ



NÁVOD NA POUŽITIE

- A.** Odopnite a uvoľnite pásiky na stehne a lýtku.
- B.** V závislosti na type zvoleného výrobku ortézu buď natiahnite na nohu, alebo ju obopnite okolo nohy a vpredu zapnite suchým zipsom. Umiestnite návlek tak, aby boli kĺby ortézy paralelne a vrchná časť kruhového vystrihnutia bola zrovnaná s vrchnou časťou jabĺčka.
- C.** Utiahnite podporné pásiky na stehne a lýtku.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

Perte ručne v studenej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

Ortéza sa môže používať v normalnej alebo slanej vode. Po použití ju dôkladne vysušte a prepláchnite čistou normálnou vodou. **USUŠTE NA VZDUCHU.**

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNENÉ PORANENIU.

