

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Podpora pro mírné nestability vnitřních a/nebo vnějších kolaterálních vazů.
- Pocit mírné nestability kloubu.
- Stav po artroskopické menishektomií.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

- A.** Odepněte a uvolněte všechny pásky.
- B.** Uchopte ortézu za kožená poutka na kovových výtžhacích a navlékněte ji na dolní končetinu. Pokud používáte zavínovací ortézu, jednoduše obtočte ortézu kolem kolena a zajistěte ji v přední části dolní končetiny. Umístěte ortézu na koleno tak, aby klouby ortézy byly na stejné úrovni po obou stranách kolena a horní část kruhového vykrojení byla zarovnána s horním okrajem česky.
- C.** Upevněte pásky na stehně a na lýtku.

SUNDÁVÁNÍ ORTÉZY

Ortézu sundáte rozeprnutím všech pásek a poté shrutím horního okraje ortézy směrem dolů oběma rukama.

POKYNY K NASTAVENÍ KLOUBOVÉHO MECHANISMU

Tato ortéza se dodává s přednastavenou zarážkou v 10° extenze z důvodu útlaku měkkých tkání. Chcete-li přednastavenou zarážku upravit, nejdříve pomocí křížového šroubováku Phillips vymontujte šrouby. Předtím, než vyjmete zarážku, je potřeba odsunout ochranný kryt.

Poznámka: Mediální i laterální zarážka musí mít stejný sklon.

ÚDRŽBA:

- Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU. Kovové výtžhy nutně nutné před mytím vyndávat. NEPERTE V PRAČCE A NESUŠTE V SUŠIČCE.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

- Kloub ortézy obvykle nevyžaduje údržbu, ale je vhodné jej pravidelně promazávat pomocí suchého lubrikantu nebo spreje Teflon™. Po použití ve vodě doporučujeme kloub ortézy promazat. Pravidelně kontrolujte šrouby v kloubu ortézy, především to, jestli jsou dostatečně utažené, a podle potřeby je utáhněte.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A PŮHODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM TEJTO POMŮCKY SI POZORNE PŘEČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNÉ NASADENIE POMŮCKY JE NEVYHUTNÉ PRE JEJÍ OPTIMÁLNÉ FUNKOVANIE.

SPŮSOB POUŽITIA A INDIKÁCIE:

- Podpora pri miernej nestabilite vnútorných a/alebo vonkajších postranných väzov.
- Pocit miernej nestability kľúbu.
- Stav po artroskopickkej menishektómii.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak počas používania tejto pomôcky pocítite bolesť, objaví sa opuch, zaznamenáte zmenu citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, okamžite kontaktujte svojho lekára.

POKYNY NA NASADENIE:

- A.** Rozopnite a uvoľnite všetky popruhy.
- B.** Uchopte ortézu za kožené pútka na kovových výtžhacích a navlečte ju na dolnú končatinu. Ak používate ortézu s popruhmi na ovíjanie, jednoducho ju ovíjate okolo kolena a zaisťte ju v prednej časti dolnej končatiny. Nasadte ortézu

13-5115-0-00000 REV C
Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com
F +1760.734.4712
T +1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41
MSS GmbH



Drytex® Hinged Knee

KOLENNÁ ORTÉZA

KOLENNÁ ORTÉZA



na koleno tak, aby boli kĺby ortézy na oboch stranách kolena v jednej rovine a horná časť kruhového výrezu bola zarovnaná s horným okrajom jabĺčka.

C. Upevnite popruhy na stehne a na lýtku.

SKLADANIE ORTÉZY

Ortézu zložte rozopnutím všetkých popruhov a následným zhrnutím horného okraja ortézy oboma rukami smerom nadol.

NÁVOD NA NASTAVENIE ZÁVESNÉHO MECHANIZMU

Táto ortéza je dodávaná so zarážkou prednastavenou na 10° extenziu z dôvodu kompresie mäkkých tkanív. Ak chcete nastaviť prednastavenú zarážku, najprv pomocou krížového skrutkovača Phillips odskrutkujte skrutky. Pred vybratím zarážky je potrebné odsunúť ochranný kryt.

Poznámka: Mediálna aj laterálna zarážka musia mať rovnaký sklon.

ÚDRŽBA:

- Ortézu vyperte ručne vo vlažnej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku, starostlivo opláchnite. **NECHAJTE VÓLNE VYSCHNÚŤ NA VZDUCHU.** Kovové výstupy nie je nutné pred práním vyberať. **NEPERTE V PRAČKE A NESUŠTE V SUŠIČKE.**

Poznámka: Ak ortézu dôkladne neopláchnete, zvyšky mydla môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo poškodenie materiálu.

- Kĺb ortézy obvykle nevyžaduje údržbu, ale je vhodné ho pravidelne premazávať suchým mazivom alebo sprejom Teflon™. Po použití vo vode odporúčame kĺb protézy premazať. Pravidelne kontrolujte skrutky v kĺbe ortézy, najmä či sú dostatočne utiahnuté, a podľa potreby ich dotiahnite.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

OZNÁMENIE: HOCI BOLO VYNALOŽENÉ MAXIMÁLNE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE ČO NAJVVYŠŠEJ FUNKČNOSTI, PEVNOSTI, ODOLNOSTI A POHODLIA A BOLI POUŽITÉ NAJMODERNEJŠIE DOSTUPNÉ METÓDY, NEMOŽNO ZARUČIŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU NEDÔJDE K ZRANENIU.