

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Podpora pro mírné nestability vnitřních a/nebo vnějších kolaterálních vazů
- Mírná artritida
- Stav po artroskopické menishektomií
- Pocit mírné nestability kloubu

KONTRAIKACIE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu.

POKYNY K NASAZENÍ:

Návrková ortéza

Zavinovací ortéza

A. Odepněte a uvolněte všechny pásy.

B. Pokud používáte návrkovou ortézu, uchopte ortézu na okraje a navlékněte ji na dolní končetinu. Pokud používáte zavinovací ortézu, jednoduše obtočte ortézu kolem kolena a zajistěte ji v přední části dolní končetiny. Umístěte ortézu na koleno tak, aby klouby ortézy byly na stejné úrovni po obou stranách kolena a horní část kruhového vykrojení byla zarovnána s horním okrajem česky.

C. Upevněte pásy na stehně a na lýtku.

D. SUNDÁVÁNÍ ORTÉZY

Ortézu sundáte rozepnutím všech pásků nebo shrnutím horního okraje ortézy směrem dolů.

ÚDRŽBA:

- Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU. Klouby ortézy je možné před praním vyjmout.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

- Ortézu je možné používat ve sladké i slané vodě. Po použití ve vodě ortézu pořádně propláchněte čistou vodou a poté ji nechte dobře vysušit na vzduchu.

SLOŽENÍ:

 **Neobsahuje přírodní pryžový latex**

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TEJTO POMŮCKY SI POZORNE PREČITAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNE NASAZENIE POMŮCKY JE NEVYHNUTNÉ PRE JEJ OPTIMÁLNE FUNKOVANIE.

SPŮSOB POUŽITIA A INDIKÁCIE:

- Podpora pri miernej nestabilite vnútorných a/alebo vonkajších postranných väzov
- Mierna artritída
- Stav po artroskopickej menishektómii
- Pocit miernej nestability kľbu

KONTRAIKÁCIE:

- Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak počas používania tejto pomôcky pocítite bolesť, objaví sa opuch, zaznamenáte zmenu citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Osoby, ktoré sú náchylné na dermatitídu alebo alergické na neopren a jeho vedľajšie produkty, by nemali nosiť ortézy vyrobené z neoprenu.

13-2972-0-00000 REV F

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

1430 Decision Street

Visa CA 92081-8553

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Drytex Wrap Economy Hinged Knee



POKYNY NA NASADENIE:

Navliekacia ortéza

Ortéza s popruhmi na ovijanie

- A.** Rozopnite a uvoľnite všetky popruhy.
- B.** Ak používate navliekaciu ortézu, uchopte ortézu za okraje a nasadte ju na dolnú končatinu. Ak používate ortézu s popruhmi na ovijanie, jednoducho ju ovíňte okolo kolena a zaisťte ju v prednej časti dolnej končatiny. Nasadte ortézu na koleno tak, aby boli klby ortézy na oboch stranách kolena v jednej rovine a horná časť kruhového výrezu bola zarovnaná s horným okrajom jabĺčka.
- C.** Upevnite popruhy na stehne a na lýtku.
- D. SKLADANIE ORTÉZY**
Ortézu zložte rozopnutím všetkých popruhov alebo zhrnutím horného okraja ortézy smerom nadol.

ÚDRŽBA:

- Ortézu vyperte ručne vo vlažnej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku, starostlivo opláchnite. **NECHAJTE VOLNE VYSCHNÚŤ NA VZDUCHU.** Klby ortézy je možné pred práním vybrať.
- Poznámka:** Ak ortézu starostlivo neopláchnete, zvyšné mydlo môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo poškodenie materiálu.
- Ortézu je možné používať v sladkej aj stanej vode. Po použití vo vode ortézu poriadne prepláchnite čistou vodou a nechajte ju dobre vysušiť na vzduchu.

ZLOŽENIE:



NEBSAHUJE PRÍRODNÝ GUMOVÝ LATEX

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

OZNÁMENIE: HOCI BOLO VYNALOŽENÉ MAXIMÁLNE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE ČO NAJVIŠŠEJ FUNKČNOSTI, PEVNOSTI, ODOLNOSTI A POHODLIA A BOLI POUŽITÉ NAJMODERNEJŠIE DOSTUPNÉ METÓDY, NEMOŽNO ZARUČIŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU NEDŮJDE K ZRANENIU.

