

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu a kompresi při mírné nestabilitě kotníku, při výronech, nemoženích, tendinitidách, artritidách a bursitidách.

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

Ortéza by měla těsně přiléhat, neměla by však omezovat krevní oběh. Ortézu nenoste přes otevřenou ránu.

### POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Posadte se na okraj židle a natáhněte ortézu na kotník. Pata by měla být umístěna v kulatém vykrojení ortézy.

### ÚDRŽBA:

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.

### UPOZORNĚNÍ:

Tento výrobek obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

## SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

### ZAMÝSLANÝ POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL:

Používateľ by mal byť schopný:

- preštudovať si a porozumieť pokynom, varovaniam a upozorneniam.

### INDIKÁCIE

- Podpora a kompresia pri miernej nestabilite členka, výrone, natiahnutí, tendinitide, artritíde a burzitíde.

### KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

### VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Bandáž by mala byť tesná, nemala by však narušať krvný obeh. Nikdy nenoste bandáž na otvorenej rane.

### NÁVOD NA POUŽITIE

1. Posadte sa na kraj stoličky a natiahnite bandáž na členok. Päta by mala byť v okrúhlym vykrojení bandáže.

### POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

Perte ručne v studenej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

**Poznámka:** Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

### UPOZORNENIE:

Tento výrobok obsahuje prírodný gumový latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

© 2021, DJO, LLC  
Datum poslednéh revize textu: 11. 1. 2021  
1-3510 REV C

www.DJOGlobal.com  
F +1760.734.4712  
T + 1760.727.1280  
USA  
Vista CA 92081-8553  
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany  
30175 Hannover  
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



# Elastic Ankle Support

HLEZENÍ BANDÁŽ ELASTICKÁ  
ELASTICKÁ OPORA ČLENKA



**UPOZORNENIE:** AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI  
TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY  
FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN  
JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM  
ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE  
PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁŇENÉ PORANENIU.

