

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu a kompresi při mírné nestabilitě kolenního kloubu.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře. Ortéza by měla těsně přiléhat, neměla by však omezovat krevní oběh. Ortézu nenoste přes otevřenou ránu.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Uchopte okraje ortézy na straně, kde je otvor širší. Navlékněte ortézu na koleno. Svinutím krátké manžety přes prsty upravte ortézu tak, aby byla česka ve středu ortézy.

ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve studené vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

POUŽITIE/INDIKÁCIE:

- Podpora a kompresia pri miernej nestabilite kolena.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak začnete počas používania tohto výrobku pociťovať bolesť, opuchy, zmeny v citlivosti alebo nejaké iné neobvyklé reakcie, okamžite sa poraďte so svojim zdravotníkom. Bandáž by mala byť tesná, nemala by však narušovať krvný obeh. Nikdy nenoste bandáž na otvorenej rane.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ:

1. Pevne uchopte okraje bandáže v mieste väčšieho otvoru. Natiahnite návlék na koleno. Plynulým tahom natiahnite bandáž tak, aby bolo jabĺčko v strede bandáže.

NÁVOD NA ČISTENIE:

- Vyperte ručne jemným mydlom v teplej vode, dôkladne opláchnite. USUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál. USUŠTE NA VZDUCHU.

ZLOŽENIE:



Neobsahuje prírodný gumový latex

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

© 2021, DJO, LLC
Datum posledního revize textu: 11. 1. 2021
13-3512 REV D

www.DJOGlobal.com
F +1760.734.4712
T + 1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Elastic Knee Support

ELASTICKÁ KOLENNÍ BANDÁŽ

ELASTICKÁ OPORA KOLENA



UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIEJE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

