

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Znehýbnění krku.

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

**Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.**

### POKYNY K NASAZENÍ:

- A. Vycentrujte krční límec pod bradou.
- B. Otočte oba konce límce kolem krku a v zadní části je zajistěte suchými zipy.
- C. Upravte límec tak, aby bylo nošení pohodlné: zkontrolujte, zda límec nebrání normálnímu dýchání.

### ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve studené vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte a sušte na vzduchu.

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

## SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

### INDIKÁCIE

- Znehýbnenie krku.

### KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

### VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**Ak pociťte počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.**

### NASADENIE

- A. Vycentrujte krčný golier pod bradou.
- B. Otočte oba konce okolo zadnej časti krku a zaistite suché zipsy.
- C. Upravte zariadenie tak, aby bolo nosenie pohodlné: skontrolujte, či golier nebráni normálnemu dýchaniu.

### POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Perte ručne v studenej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

**UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VĚNOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLÍ, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNENÉ PORANENIU.**

Datum poslednéj revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC  
13-1338-0-00000 REV D

www.DJOGlobal.com  
F +1760.734.4712  
T +1760.727.1280  
USA  
Vista CA 92081-8553  
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany  
30175 Hannover  
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



# Form Fit Cervical Collar / Clinic Low Density Collar

KRČNÍ LÍMEC FORM FIT

KRČNÝ GOLIER FORM FIT



