

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

PRO KOHO JE POMŮCKA URČENA?

- Uživatelem pomůcky by měl být lékař, pacient, pacientův pečovatel nebo asistující rodinný příslušník pacienta.
- Uživatel by měl být schopný:
- přečíst instrukce, upozornění a varování uvedené v návodu k použití, porozumět jim a fyzicky je zvládnout.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Léčba akutní nebo chronické bolesti zad v lumbosakrální oblasti; artróza bederní páteře.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

Ujistěte se, že jste zvolili vhodnou velikost pásu, abyste docílili maximální účinnosti léčby. Upevněte pásy tak, aby byl pás dostatečně utažen.

1. Rozepněte všechny 4 pásy.
2. Nasadte si podpůrný pás kolem pasu a upevněte jej pomocí suchého zipu.
3. Zatáhněte za pásy a utáhněte tak bederní pás na požadovanou úroveň. Pásy upevněte na přední straně bederního pásu pomocí suchého zipu.

ÚDRŽBA:

Ortému perle ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Nepoužívejte bělicí prostředky. Sušte volně na vzduchu, nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Ortézu nežehlete.

SLOŽENÍ:

Polyamid, polyester, PVC, přírodní kaučuk (latex), elastan, ocel.

UPOZORNĚNÍ:

Tento výrobek obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POHODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

ZAMÝŠLANÝ POUŽÍVATEĽSKÝ PROFIL:

Určený používateľ by mal byť lekárom, odborníkom s platným oprávnením, pacient, ošetrovateľ pacienta alebo člen rodiny poskytujúci pomoc. Používateľ by mal byť schopný:

- preštudovať si a porozumieť pokynom, varovaniam a upozorneniam.

INDIKÁCIE

- Liečba akútnych alebo chronických bolestí dolnej časti chrbtice, lombar artróza.

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre maximálnu účinnosť zaistite výber vhodnej veľkosti a primeranú utiahnutie popruhov.

1. Otvorte 4 popruhy.
2. Umiestnite oporu okolo pásu a uzavrite pomocou kontaktného uzáveru.
3. Zatiahnite bočné elastické popruhy do požadovanej pozície a pripevnite ich pomocou kontaktného uzáveru k prednej časti opory.

© 2021, DJO, LLC
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021
1-3-8570 Rev B

www.DJOglobal.com
F +1760.734.4712
T +1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street

DJO, LLC




Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Immostrap™

LUMBOSAKRÁLNI PODPŮRNÝ PÁS
BEDROVO-KRÍŽOVÁ OPORA

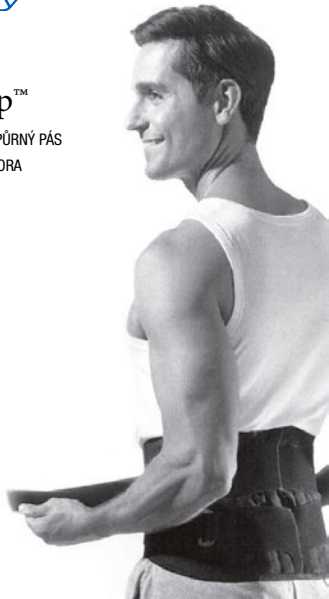

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Perte ručne v studenej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu. Nesmie sa bieliť. Nesušte v sušičke. Nesmie sa čistiť chemicky.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

ZLOŽENIE:

Polyamid, polyester, PVC, guma, elastan, oceľ

UPOZORNENIE:

Tento výrobok obsahuje prírodný gumový latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁŇENÉ PORANENIU.

