

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu, zahřívání a kompresi při mírné nestabilitě a bolesti kolenního kloubu.

KONTRAINDIKACE:

- Pacienti s flebitidou (zánět žil) by neměli nosit výrobky z neoprenu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

1. Uchopte okraje ortézy na straně, kde je otvor širší. Navlékněte ortézu na koleno tak, aby byla česka umístěna v otvoru na přední straně ortézy.
2. Obtočte a upevněte dolní a poté horní neoprenový pásek na vnitřní stranu kolene.

ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve studené vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE

Podpora, teplo a kompresia pre mierne nestability a bolesť kolena.

KONTRAINDIKÁCIE

- Pacienti s flebitidou by nemali nosiť neoprenové výrobky.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Neoprenové podpory by nemali používať jednotlivci, ktorí o sebe vedia, že sú náchylní na dermatitidy alebo alergie spôsobené vedľajšími účinkami neoprenu. Ak pri používaní tohto výrobku zaznamenáte nejakú bolesť, opuchy, pocity zmeny, alebo akékoľvek neobvyklé reakcie, poraďte sa okamžite s lekárom.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Uchopte kraje manžety vo väčšom otvore. Prekročte cez manžetu, pričom ju umiestnite na koleno tak, že otvor vpredu obklopi jabĺčko.
2. Oviňte a pripojte spodný a potom vrchný neoprenový pás k vnútornej strane kolena.

ÚDRŽBA

- Umývajte ručne v teplej vode pomocou jemného mydla a dôkladne opláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak sa mydlo dôkladne neopláchne, jeho zvyšky môžu spôsobovať podráždenie a poškodzovať materiál.

ZLOŽENIE



Neobsahuje prírodný gumový latex

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

13-6247 REV C
Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Lateral J Patella Support

PODPORA KOLENNÍ S LATER. J VÝZTUHOU PATELY
PŘI LATERÁLNÍ SUBLUXACI ČEŠKY

LATERÁLNĀ BANDÁŽ PATELY



UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

