

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Bolesti v bedrech v důsledku těhotenství
- Podpurný pás břišní krajiny v těhotenství
- Pro pomoc při odstranění nepříjemného pocitu v těhotenství z důvodu napětí a zvětšení břicha

KONTRAIKADIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

1. Nasadte bederní podporu kolem pasu za použití poutek pro ruce. Bederní podporu utáhněte pomocí uzavíracího háčku na přední straně podpory.
2. Zatáhněte za pásy na bočních stranách a nastavte úroveň stažení.
3. Postranní pásy vpředu utáhněte pomocí uzavíracího háčku.

ÚDRŽBA:

- Ortézu myjte v teplé vodě s použitím slabého čistícího roztoku. Nepoužívejte bělidlo. Důkladně vymáchejte a sušte na vzduchu. Nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Nežehlete.

SLOŽENÍ:

- Polyester, polyamid, polyuretan, elasthan, bavlna, ocel, polykarbonát



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVANO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITY NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

PROFIL URČENÉHO POUŽÍVATEĽA:

- Určený používateľ by mal byť medicínsky odborník s platným oprávnením, pacient, ošetrovateľ pacienta alebo člen rodiny poskytujúci pomoc. Používateľ by mal byť schopný:
- prečítať si všetky pokyny, varovania a upozornenia v návode na použitie. Musí im porozumieť a byť fyzicky schopný ich vykonať.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Bolesti v bedrovej oblasti kvôli tehotenstvu
- Brušná podpora počas tehotenstva
- Na zmiernenie nepohodlia počas tehotenstva vyvolávaného rozťahnutím a zväčšením brucha.

KONTRAIKADIKÁCIE:

- Žiadne kontraindikácie

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Bedrovú opornú časť umiestnite okolo pásu pomocou pútok z ruky. Uťahnite bedrovú opornú časť pomocou patentného uzáveru v prednej časti opory.
2. Potiahnutím za bočné popruhy nastavte úroveň stlačenia.
3. Uťahnite bočné popruhy v prednej časti opory pomocou patentného uzáveru.

ÚDRŽBA:

- Perte vo vlažnej vode pomocou jemného čistiacieho prostriedku. Nesmie sa bieliť. Dôkladne vypláchnite a nechajte uschnout na vzduchu. Nesušte v sušičke. Nesmie sa čistiť chemicky. Nesmie sa žehliť.

13-8594 REV B
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com
F +1760.734.4712
T + 1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street
DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



MyBabystrap™

TĚHOTENSKÝ OPASEK
MATERSKÝ PAS



ZLOŽENIE

- Polyester, polyamid, polyuretán, elastan, bavlna, oceľ, polykarbonát



Neobsahuje prírodný gumový latex

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: TENTO VÝROBOK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ POD DOHLADOM LEKÁRA. TÁTO POMÓCKA NIE JE URČENÁ NA LAICKÉ POUŽÍVANIE BEZ DOZORU. POKIAĽ PRI POUŽITÍ TOHTO VÝROBKU POCIŤUJETE AKÚKOLVEK BOLEŠŤ, OPUCH, ZMENY CITLIVOSTI ALEBO AKÉKOLVEK NEOBÝVKLÉ REAKCIE, OKAMŽITE TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM.

