

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FungOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Patelární tendinitida, Osgood-Schlatterova choroba a chondromalacie český.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Nepoužívejte u pacientů s křečovými žilami.

Nenoste pásku na spaní a v letadle.

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

A. Dolní končetinu lehce ohněte a umístěte širší část pásky s logem DonJoy na zadní stranu kolena.

B. Otočte pásky zepředu kolem kolena a zasuňte jejich konce do otvorů, aby bylo možné je utáhnout. Upravte do pohodlné polohy.

Páska by měla být umístěna těsně pod českou.

ÚDRŽBA:

Ortýze perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Sušte volně na vzduchu.

SLOŽENÍ:

Neopren.



Neobsahuje přírodní pryžový latex.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SÍLY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FungOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE/INDIKÁCIE:

- Patelárna tendinitída, Osgood-Schlatterova choroba alebo chondromalácia pately.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Nepoužíajte, ak máte kŕčové žily.

Nenoste do postele ani v lietadle.

Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE:

A. Keď je noha mierne vo flexii, umiestnite širšiu časť popruhu logom DonJoy na zadnú stranu kolena.

B. Popruhy ovíňte okolo prednej časti kolena a zasuňte ich konce do otvorov v popruhu, aby ich bolo možné utiahnuť. Upravte do pohodlnej polohy. Popruh by sa mal nachádzať tesne pod patellou.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Perte ručne vo vlažnej vode pomocou jemného čistiacieho prostriedku. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

ZLOŽENIE:

Neoprén.



Neobsahuje prírodný gumový latex.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

Datum poslednéj revízie textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

13-4860 REV A

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1880

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany

30175 Hannover

Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Patella X Strap

ZKŔIŽENÝ POPRUH NA ČESKÚ

SKŔIŽENÝ POPRUH NA JABLČKÚ



ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

**UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI
TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY
FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN
JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM
ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE
PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁŇENÉ PORANENIU.**