

## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

### ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Akutní nebo chronické bolesti zad v lumbosakrální oblasti; bederní ischias (zánět sedacího nervu).

### KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

**Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.**

### POKYNY K NAsAZENÍ:

Ujistěte se, že jste zvolili vhodnou velikost pásu, abyste docílili maximální účinnosti léčby. Upevněte pásy tak, aby byl pás dostatečně utážen.

1. Zatahněte břicho. Povolte postranní elastické popruhy tak, aby volně visely. Nasadte si podpůrný pás kolem pasu a upevněte jej zepředu pomocí suchého zipu.
2. Zatahněte za popruhy a utáhněte tak bederní pás na požadovanou úroveň. Popruhy upevněte na přední straně bederního pásu pomocí suchého zipu.

### ÚDRŽBA:

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Nepoužívejte bělicí prostředky. Sušte volně na vzduchu, nesušte v sušičce. Nečistěte chemicky. Ortézu nežehlete.

### SLOŽENÍ:

Polyamid, polyester, PVC, přírodní kaučuk (latex), elastan, ocel.

### UPOZORNĚNÍ:

**Tento výrobek obsahuje přírodní kaučukový latex, který může vyvolat alergické reakce.**

### URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

**OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.**

## SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

### INDIKÁCIE

- Liečba akútnej alebo chronickej bolesti spodnej časti chrbta; bedrovej ischias.

### KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne.

### VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

**Ak pocítite počas používania tohto produktu akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti alebo nezvyčajné reakcie, ihneď kontaktujte svojho lekára.**

### NÁVOD NA POUŽITIE

Pre maximálnu účinnosť zaistite výber vhodnej veľkosti a primerané utiahnutie popruhov.

1. Navlečte si pás na brucho. Povoľte pružné bočné pásy natoľko, aby boli celkom voľné. Oviňte si remeň okolo pásu a uzavrite dotykový uzáver. Vtiahnite brucho.
2. Zatiahnite bočné pružné pásy tak, ako potrebujete a vpredu ich upevnite suchým zipsom.

### POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Perte ručne vo vlažnej vode pomocou jemného čistiacieho prostriedku. Dôkladne vypláchnite a sušte na vzduchu. Nesmie sa bieliť. Nesušte v sušičke. Nesmie sa čistiť chemicky.

**Poznámka:** Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydlo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

### ZLOŽENIE:

Polyamid, polyester, PVC, guma, elastan, oceľ

© 2021, DJO, LLC  
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021  
13-8568 Rev A

www.DJOglobal.com  
F +1760.734.4712  
T + 1760.727.1280  
USA  
Vista CA 92081-8553  
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany  
30175 Hannover  
Schiffgraben 41  
MDSS GmbH



Porostrap™

LUMBOSAKRÁLNI PODPŮRNÝ PÁS  
BEDROVO-KRÍŽOVÁ OPORA



#### UPOZORNENIE:

Tento výrobok obsahuje prírodný gumový latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

#### URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

**ZÁRUKA:** DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

**UPOZORNENIE:** AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁNENÉ PORANENIU.

