

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Kolenní ortéza REACTION byla navržena tak, aby pomáhala zmírnit bolest absorbovaním nárazů a navrácením kinetické energie zpět do kolene. Indikace k použití jsou mírné až střední patelofemorální bolesti nebo přeskakování česky a mírná až střední artritida.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Navlékněte návlak tak, aby pohodlně seděl a aby byla česka umístěna uprostřed otvoru ve tvaru přesýpacích hodin. (Nosit pod ortézou návlak není nutné).
2. Překryjte síť kolenní kloub tak, aby byl její otvor zarovnan s českou. (Obr. 2b)
3. Provlékněte pásky na jedné straně podložky vnitřními otvory na síť a připevněte ji k podložce pomocí suchého zipu.
Poznámka: Vložka podložky by měla být umístěna směrem k noze a suchý zip směrem od nohy. Na vnější straně sítě by mělo být logo, na vnitřní straně důlky.
4. Provlékněte zbylé pásky podložky volnými otvory na síť a připevněte k podložce pomocí suchého zipu.
5. a: Poté co upevníte všechny pásky a ujistíte se, že dobře přiléhají, uchopte oba dolní popruhy a tahem za ně ortézu nastavte tak, aby pevně a pohodlně seděla.
b: Stejný postup opakujte i u horních popruhů. Ortéza by měla pevně, ale pohodlně sedět – příliš ji neutahujte.

ÚDRŽBA:

- Plastové části i vložky je možné prát ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. Části ortézy sušte zvláště volně na vzduchu.

SLOŽENÍ



Neobsahuje přírodní pryžový latex

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

oznámění: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKčnosti, síLY, odolnosti a pohodlí VĚNOVANO MAXIMÁLNÍ úSÍLÍ a POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Kolenná ortéza REACTION je určená na pomoc pri znížení bolestivosti absorbovaním otrasov a presmerovaním kinetickej energie do kolena. Indikácie na použitie sú mierne až stredná patelofemorálna bolestivosť alebo chybné spojenie pately a mierne až stredná osteoartrída kolena.

KONTRAINDIKÁCIE:

V súvislosti s týmto výrobkom sa neuvádzajú žiadne kontraindikácie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak pri použití tohto výrobku pociťujete akúkoľvek bolesť, opuchy, zmeny citlivosti či nezvyčajné reakcie, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA:

1. Manžetu natiahnite tak, aby to bolo príjemné a aby sa jabĺčko nachádzalo v strede otvoru v tvare presýpacích hodin. (Nosenie manžety je voľiteľné.)
2. Nad kolenný kĺb položte mriežku, pričom ju vycentrujte zarovnaním otvoru s jabĺčkom (obrázok 2b).
3. Ušká na jednej strane zadnej podložky prevlečte cez vnútorné otvory na mriežke a časť s háčikmi pripnite na stranu zadnej podložky so slučkami.

Poznámka: Strana zadnej podložky z rozperovým materiálom sa musí uložiť

© 2021, DJO, LLC
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

1-3-3336 REV A

www.DJOGlobal.com
F +1760.734.4712
T +1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY®

Reaction Knee Brace

KOLENNÁ ORTÉZA

KOLENNÁ ORTÉZA



smerom k nohe a strana so slučkami smerom od nohy. Na vonkajšej strane mriežky je logo, vnútorná strana má jamky.)

4. Voľné ušká na zadnej podložke prevlečte cez dostupné otvory na mriežke a ušká s háčikmi potom pripnite na zadnú podložku so slúčkovitým povrchom.
5. a: Po pripojení všetkých ušíek, ktoré zabezpečujú potrebnú tesnosť, zdvihnite a potiahnite obe spodné ušká, kým nebudú natesno zarovnané.
b: Toto zopakujte aj s horným párom ušíek – ortéza musí tesne a pohodlne priliehať, neťahajte ju prisilno.

NÁVOD NA ČISTENIE:

- Umelohmotné časti aj podložky sa dajú prať ručne vo vlažnej vode s jemným mydlom. Dôkladne opláchnite. SUŠTE samostatne NA VZDUCHU.

SLOŽENÍ



NEBSAHUJE LATEX.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNIK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZISKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE UČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

