

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Podpora pro mírné nestability vnitřních a/nebo vnějších kolaterálních vazů
- Mírná artritída
- Stav po arroskopické menishektomii
- Pocit mírné nestability kloubu

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu.

VAROVÁNÍ: Tato pomůcka by měla být používána pod dohledem zdravotnického pracovníka. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

- Odepněte a uvolněte všechny pásy.
- Obtočte ortézu kolem kolena a zajistěte ji v přední části dolní končetiny. Umístěte ortézu na koleno tak, aby klouby ortézy byly na stejné úrovni po obou stranách kolena a horní část kruhového vykrojení byla zarovnána s horním okrajem česky.
- Upevněte zadní pásy na stehně a na lýtku tak, aby ortéza pohodlně seděla.
- Upevněte přední pásy na stehně a na lýtku.
- SUNDAVÁNÍ ORTÉZY**
Ortézu sundáte rozeptnutím všech pásků.

ÚDRŽBA:

- Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. **SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.** Klouby ortézy je možné před praním vyjmout.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

- Ortézu je možné používat ve sladké i slané vodě. Po použití ve vodě ortézu pořádně propláchněte čistou vodou a poté ji nechte dobře vysušit na vzduchu.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

INDIKÁCIE:

- Stredné poškodenie mediálnych (MCL) alebo bočných (LCL) kolaterálnych väzov
- Stredne ťažká artritída
- Liečba po artoskopii, menishektómii
- Stredne ťažká celková nestabilita

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

NEOPRENOVÉ ORTÉZY NESMÚ POUŽÍVAŤ OSOBY SO ZNÁMOU NÁCHYLNOSŤOU NA DERMATITÍDU ALEBO ALERGIE NA NEOPRENOVÉ VÝROBKY.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA:

- Odpnite a uvoľnite popruhy na stehne a lýtku.
- Oviňte ortézu okolo nohy a upevnite vpredu na nohe. Ortézu umiestnite tak, aby závesy boli vzájomne rovnobežne a horná časť okrúhleho výrezu bola zarovnaná s hornou časťou kolenného jablčka.
- Nastavte popruhy v zadnej časti stehna a lýtka tak, aby pohodlne sedeli.
- Utiahnite popruhy v prednej časti stehna a lýtka.
- ODSTRÁNENIE ZARIADENIA**
Ak chcete zariadenie odstrániť, uvoľnite popruhy a predné chlopne.

Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021

13-1588-0-00000 REV.C

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



DONJOY[®]

Reddie Brace[™]

NEOPRENOVÁ KOLENNÍ ROZEPÍNACÍ ORTÉZA

NEOPRENOVÁ KOLENNÁ ROZOPÍNAJÚCA ORTÉZA

DJO

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

- Perte v rukách v studenej vode s použitím jemného mydla a dôkladne opláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU. Závesy môžete pred práním odstrániť.

Poznámka: Ak sa pomôcka dôkladne neopláchne, zvyšky mydla môžu vyvolať podráždenie a poškodiť materiál.

- Ortéza sa môže používať v studenej aj slanej vode. Po použití pri vodných aktivitách výrobok dôkladne odvodnite, opláchnite čistou čerstvou vodou. SUŠTE NA VZDUCHU.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: TENTO VÝROBK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ POD DOHLADOM LEKÁRA. TÁTO POMÔCKA NIE JE URČENÁ NA LAICKÉ POUŽÍVANIE BEZ DOZORU. POKIAĽ PRI POUŽITÍ TOHTO VÝROBKU POCIŤUJETE AKÚKOLIEK BOLEŠŤ, OPUCH, ZMENY CITLIVOSTI ALEBO AKÉKOLIEK NEOBVYKLÉ REAKCIE, OKAMŽITE TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM.

