

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu akutní i chronické nestability kotníku. Vhodné pro profylaktické používání.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

1. Rozepněte všechny pásky. Nasadte RocketSock na kotník v poloze, kde noha a bérce svírají úhel 90°. Položte patu do zadní části ortézy. Zajistěte ortézu suchými zipy na nártu a kolem kotníku.
2. Protáhněte pásek (A) plastovou sponkou a utáhněte.
3. Mírně vytočte patu směrem ven. Přitáhněte pásek pro zajištění paty (B) a pásek pro přední část nohy (C) na vnější stranu ortézy.

Poznámka: Pokud jsou pásky příliš dlouhé, je možné je po připevnění ke kotníku zkrátit.

4. Protáhněte pásek (D) na vrchu ortézy plastovou sponkou a utáhněte. Připevněte pásek (E) přes horní část pásků (B) a (C).

Poznámka: Je nutné, aby pásky byly utážené, ne však natolik, aby omezovaly krevní oběh v noze. Pokud se krevní oběh zdá snížený, uvolněte a znovu utáhněte pásky ve správném pořadí.

Větší podpory lze dosáhnout při současném užívání kotníkové sportovní obuvi.

ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘEŠTŮŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TEJTO POMŮCKY SI POZORNE PREČITAJTE VŠETKY NÁSLEDUJÚCE POKYNY. SPRÁVNE NASADENIE POMŮCKY JE NEVYHNUTNÉ PRE JEJ OPTIMÁLNE FUNKOVANIE.

SPŮSOB POUŽITIA A INDIKÁCIE:

- Ortéza na podporu akútnej a chronickej nestability členka. Vhodné na profylaktické použitie.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Ak počas používania tejto pomôcky pocítite bolesť, objaví sa opuch, zaznamenáte zmenu citlivosti alebo iné nezvyčajné reakcie, okamžite kontaktujte svojho lekára.

POKYNY NA NASADENIE:

1. Rozopnite všetky popruhy. Nasadte si fixátor RocketSock na členok v polohe, v ktorej noha a predkolenie zvierajú uhol 90°. Umiestnite pätu do zadnej časti ortézy. Ortézu upevnite pomocou suchých zipsov na priehlavku a okolo členku.
2. Pretiahnite popruh (A) cez plastovú pracku a utiahnite ho.
3. Päťu mierne vytočte smerom von. Popruh na fixáciu päty (B) a popruh pre prednú časť nohy (C) pretiahnite na vonkajšiu stranu ortézy.
Poznámka: Ak sú popruhy príliš dlhé, môžete ich po upevnení na členok skrátiť.
4. Pretiahnite popruh (D) na hornej strane ortézy pomocou plastovej pracky a utiahnite. Připevnite popruh (E) cez hornú časť popruhov (B).

13-8432-0-00000 REV.C

© 2021, DJO, LLC

Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41
MDSS GmbH



DONJOY

RocketSoc

HLEZENÍ ORTÉZA S VÝSTUHOU, DRYTEX
ORTÉZA NA ČLENOK S VÝSTUHOU, DRYTEX

DJO

Poznámka: Je potrebné, aby boli popruhy utiahnuté, ale nie natoľko, aby obmedzovali krvný obeh v nohe. Ak sa zdá, že je prúdenie v krvnom obehu znížené, uvoľnite a znovu utiahnite popruhy v správnom poradí.

Väčšiu podporu možno dosiahnuť súčasným používaním športovej členkovej obuvi.

ÚDRŽBA:

- Perte ručne vo vlažnej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku a dôkladne opláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak ortézu dôkladne neopláchnete, zvyšky mydla môžu spôsobiť podráždenie pokožky alebo poškodenie materiálu.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

OZNÁMENIE: HOCI BOLO VYNALOŽENÉ MAXIMÁLNE ÚSILIE NA DOSIAHNUTIE ČO NAJVVYŠŠEJ FUNKČNOSTI, PEVNOSTI, ODOLNOSTI A POKOHLIA A BOLI POUŽITÉ NAJMODERNEJŠIE DOSTUPNÉ METÓDY, NEMOŽNO ZARUČIŤ, ŽE PRI POUŽÍVANÍ TOHTO VÝROBKU NEDÔJDE K ZRANENIU.

