

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- **Lumbosakrální pás:** Podpora a fixace při naražení či namožení bederní a břišní stěny.
- **Břišní pás:** Podpora a fixace při namožení a oslabení břišní stěny.
- **Hrudní pás:** Podpora a fixace při zlomeninách a namožení hrudníku.

Lumbosakrální pás a břišní pás:

A. Umístěte střed pásu nad křížovou oblast. Levou stranu pásu přetáhněte přes přední část těla, totéž opakujte na pravé straně a pás zajistěte.

Lumbosakrální pás s popruhy nebo pásky:

B. Postupujte podle kroku A. Uchopte postranní popruhy nebo pásky a natáhněte je směrem dopředu, poté je pevně zajistěte.

Hrudní pás:

C. Umístěte pás kolem hrudníku. Levou stranu pásu ovíňte kolem přední části těla, totéž opakujte na pravé straně a pás zajistěte. Hrudní pás Deluxe se zapíná na zádech.

D. Podpůrné pásy by měly být dostatečně utažené, ale zároveň pohodlně sedět.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu.

Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

ÚDRŽBA:

- Pásy perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

- Hrudní pásy nejlépe fungují při nošení přímo na kůži nebo na spodním prádle.
- Při používání pomůcek kompatibilních se systémem Comfort-Form dodržujte instrukce pro ohřev a nasazování vložky Comfort-Form při nasazování vložky zpět do ortézy.

SLOŽENÍ:

- Neopren

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKČOVANIU.

INDIKÁCIE:

- **Chrbtové ortézy:** Poskytujú podporu a fixáciu pri naražení a presilení bedrovej a brušnej oblasti.
- **Brušné pásy:** Poskytujú podporu a fixáciu pri presilení a oslabení brušnej oblasti.
- **Hrudné pásy:** Poskytujú podporu a fixáciu pri fraktúrach a presileniach hrudného koša.

Chrbtové ortézy a brušné pásy:

A. Umiestnite stred ortézy do křížovej oblasti. Pevne obtiahnite ľavú stranu dopredu okolo tela, opakujte na pravej strane a spojte.

Chrbtová ortéza so sťahovacími popruhmi:

B. Postupujte ako v kroku A. Uchopte sťahovacie popruhy, pevne ich utiahnite a zapnite.

Hrudné pásy:

C. Umiestnite pás na hrudný kôš. Obtočte ľavú stranu okolo tela, opakujte s pravou stranou a zapnite. Zapínanie pásu Deluxe je umiestnené vzadu.

D. Ortézy musia tesne priliehať, ale musia byť pohodlné.

13-1361-0-00000 REV D
Datum poslední revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOglobal.com

F +1760.734.4712

T + 1760.727.1280

USA

Visa CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Sacro-Lumbar Support

BEDERNÍ PÁS PRODYŠNÝ S POSTRANNÍMI TAHY
CHRBTOVÉ, BRUŠNÉ, HRUDNÉ ORTÉZY



VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Neoprénové ortézy by nemali nosiť jedinci so známou náchylnosťou na dermatitídu alebo alergie na neoprénové výrobky.

Ak pri používaní tohto produktu pociťujete akúkoľvek bolesť, všimli ste si opuch, zmeny citu pri dotyku alebo iné neobvyklé reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

- Perte v rukách v studenej vode s použitím jemného mydla, dôkladne opláchnite. NECHAJTE VYSUSIŤ NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak sa pomôcka dôkladne neopláchne, zvyšky mydla môžu vyvolať podráždenie pokožky a poškodiť materiál.

- Hrudné pásy sú najúčinnejšie keď sú nosené priamo na pokožke alebo spodnej bielizni.
- Pre ortézy kompatibilné so systémom Comfort-Form dodržiavajte inštrukcie Comfort-Form pre vkladanie ohrievania a nasadzovanie predtým ako ho vložíte do ortézy.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: TENTO VÝROBK SA MUSÍ POUŽÍVAŤ POD DOHLADOM LEKÁRA. TÁTO POMÔCKA NIE JE URČENÁ NA LAICKÉ POUŽÍVANIE BEZ DOZORU. POKIAL PRI POUŽITÍ TOHTO VÝROBKU POCIŤUJETE AKÚKOLVEK BOLEŠŤ, OPUCH, ZMENY CITLIVOSTI ALEBO AKÉKOLVEK NEOBÝVKÉ REAKCIE, OKAMŽITE TO KONZULTUJTE SO SVOJÍM LEKÁROM.