

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NAsAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu, prohřátí a kompresi při mediální epikondylitidě (golfový loket), laterální epikondylitidě (tenisový loket), bursitidě nebo artritidě.

KONTRAINDIKACE:

- Pacienti s flebitidou (zánět žil) by neměli nosit výrobky z neoprenu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NAsAZENÍ:

1. Nasadte ortézu na předloktí v místě nejméně na šířku dvou prstů pod loketním ohbím.
2. Vypolstrovanou část ortézy umístěte na postiženou stranu předloktí, směrem od těla.
3. Protáhněte pásek plastovou sponkou a zajistěte. Pokud se jedná o tenisový loket, zajistěte suchý zip. Ortéza by měla těsně, ale pohodlně přiléhát tak, aby neomezovala krevní oběh v ruce.

ÚDRŽBA:

- Perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNE POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Podpora, teplo a kompresia pre bežnú epikondylitídu (lakteť hráčov golfu), laterálnu epikondylitídu (tenisový lakteť), tendonitídu, burzitídu alebo artritídu.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Pacienti s flebitídou by nemali nosiť neoprérové výrobky.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Neoprérové podpory by nemali používať jednotlivci, ktorí o sebe vedia, že sú náchylní na dermatitídu alebo alergie spôsobené vedľajšími účinkami neopréru. Ak pri používaní tohto výrobku zaznamenáte nejakú bolesť, opuchy, pocity zmeny, alebo akékoľvek neobvyklé reakcie, poraďte sa okamžite s lekárom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Ovinite bandáž okolo predlaktia na šírku najmenej dva prsty pod záhybom lakťa.
2. Chránič položte na postihnutú stranu predlaktia s krúžkom-d umiestneným na vonkajšej strane ramena, preč od tela.
3. Koniec prevlečte cez krúžok-d a zaistite. Pri tenisovom lakti ovinite, zaistite háčikovým a slučkovým uzáverom. Bandáž by mala sadnúť prílehlavo, ale nie príliš tesne, aby nebránila krvnému obehu.

ÚDRŽBA:

- Umyvajte ručne v teplej vode pomocou jemného mydla a dôkladne opláchnite. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Ak sa mydlo dôkladne neopláchnete, jeho zvyšky môžu spôsobovať podráždenie a poškodzovať materiál.

© 2021, DJO, LLC
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021
1-3-6248 REV D

www.DJOglobal.com
F +1760.734.4712
T +1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street
DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



Surround® Tennis Elbow

PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ

BANDÁŽ NA TENISOVÝ LAKEŤ



ZLOŽENIE:

Neobsahuje prírodný gumový latex.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIEJE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

