

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Mírně až středně závažné subluxace česky, dislokace česky, patelární artritida a mediální/laterální nestabilita.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jedinci, kteří jsou náchylní k dermatitidě nebo alergické reakci na neopren a jeho vedlejší produkty, by neměli nosit ortézy vyrobené z neoprenu. Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

Posadte se na kraj židle, natáhněte celou dolní končetinu, patu položte na zem tak, aby palec směřoval vzhůru a povolte kvadriceps.

1. Navlékněte ortézu na koleno tak, aby otvor pro česku vybočoval ze středu do mediální (vnitřní) strany kolene. To umožní, aby se výztuž ortézy dostala do přímého kontaktu s laterálním (vnějším) okrajem česky (Obr. 1).
2. Ujistěte se, že se výztuž nachází přímo na kůži a je zarovnána s laterálním okrajem česky. Omotejte dolní popruh kolem nohy a upevněte jej pomocí suchého zipu. Horní popruh upevněte stejným způsobem (Obr. 2 a 3).
- Chcete-li na česku aplikovat větší podporu tahem, můžete oba popruhy zapnout najednou a upevnit je pomocí jednoho suchého zipu.
- Popruhy je možné utáhnout nebo povolit a docílit tak požadované úrovně podpory česky.
- Délku popruhu je možné upravit uvolněním konce popruhu od zadní strany popruhu a jeho nastavením na požadovanou délku (Obr. 4).
- Postranní výztuhy je možné vyjmout tak, že je vysunete z jejich pouzdra skrz drážku umístěnou zevnitř ortézy v její horní části (Obr. 5 a 6).

ÚDRŽBA:

- Výztuž perte ručně ve studené vodě s použitím jemného čisticího prostředku, aby znovu získala svou původní „přilnavost“.

SLOŽENÍ:



Neobsahuje přírodní pryžový latex.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PŘED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PŘEČÍTAJTE CELÉ NÁSLEDUJÚCE INSTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKČOVANIU.

URČENÉ POUŽITIE A INDIKÁCIE:

- Pri miernych subluxáciách, podvrtnutiach patelary a artritíde patelary a pre zachovanie mediálnej/laterálnej stability.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Žiadne.

VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Opory by nemali nosiť jedinci s náchylnosťou na dermatitídu alebo alergiu na neoprénové produkty. Pokiaľ pociťujete akúkoľvek bolesť, opuch, zmeny vnímania alebo akékoľvek neobvyklé reakcie pri použití tohto produktu, okamžite to konzultujte so svojim lekárom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Poznámka: Nasadzujte v sede na konci stoličky s nohou v plnej extenzii a pätou na podlahe, palcom smerom nahor a relaxovaným musculus quadriceps.

1. Navlečte nohu do ortézy tak, že otvor na patellu je centrálné voči laterálnej strane kolena. To umožní, že vyplň bude v priamom kontakte s bočnými okrajmi patelary. (Obr. 1)
2. Zaisťte, že vyplň je v tesnom kontakte s pokožkou a bočnými okrajmi patelary, omotajte spodný popruh okolo lýtky, pričom ho zaisťte k háčiku a slučkám.

© 2021, DJO, LLC
Datum poslednej revízie textu: 11. 1. 2021
13-0641 REV B

www.DJOGlobal.com
F +1760.734.4712
T + 1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8553
1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MDSS GmbH



TRU-PULL® Lite

KOLENNÍ ORTÉZA PRO STABILIZACI PATELY
S POSTRANNÍ VÝZTUHOU

KOLENNÁ ORTÉZA ELASTICKÁ
S VÝZTUŽAMI PRE
KOREKCIU NEŽIADUCÍCH
POHYBOV PATELY



Horný popruh zaistíte rovnakým spôsobom. (Obr. 2 a 3)

- Ak chcete ortézu viac utiahnuť k patelle, utiahnite naraz oba popruhy a pripojte k háčičku a slučke.
- Požadovaný ťah na patellu sa môže regulovať ťahom za popruhy.
- Dĺžka popruhu sa môže prispôsobiť uvoľnením konca popruhu zo zadnej časti popruhu a upravením na požadovanú dĺžku. (Obr. 4)
- Kĺby sa môžu vytiahnuť z krytu cez otvor na vnútornej hornej časti kĺbového krytu. (Obr. 5 a 6)

ÚDRŽBA:

- Výplň umývajte mydlom a vodou podľa potreby.



Neobsahuje prírodný gumový latex.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

POZNÁMKA: AJ KEĎ SA U NAJMODERNEJŠÍCH TECHNÍK VENOVALO VŠETKO ÚSILIE ZÍSKANIU MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, NIE JE MOŽNÉ ZARUČIŤ, ŽE POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU BUDE ÚČINNOU PREVENCIOU VOČI PORANENIU.

