

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TĚTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKČOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Akutní vymknutí kotníku, chronické nestability kotníku.
- Vhodné pro profylaktické používání.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Malé procento pacientů může mít alergii na neopren. Pokud se při nošení ortézy objeví vyrážka, ihned ortézu sundejte. Pokud by vyrážka přetrvávala, obraťte se na svého lékaře.

VAROVÁNÍ: Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKYNY K NASAZENÍ:

- A. Rozepněte nártové a kotníkové pásky. Vsedě si ortézu nasadte a upevněte nártový pásek (č. 1), poté obtočte a upevněte dolní kotníkový pásek (č. 2).
- B. Vytahujte výztuhy kolem paty (č. 3) směrem nahoru, dokud pohodlně nesesedí a zajistíte.
- C. Obtočte a upevněte horní kotníkový pásek (č. 4). Pokud je to potřeba, znovu upevněte dolní kotníkový pásek.

ÚDRŽBA:

Ortézu perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, pečlivě opláchněte. SUŠTE VOLNĚ NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu.

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKOHLÍ VĚNOVANO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÉ NASLEDUJÚCE INŠTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NUTNÉ K JEHO SPRÁVNEMU FUNKČOVANIU.

INDIKÁCIE:

- Akútne podvrtnutie členka, chronická nestabilita členka. Vhodné na profylaktické použitie.

KONTRAINDIKÁCIE:

- Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

VÝSTRAHY A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Malé percento pacientov môže mať alergiu na neoprén. Ak sa počas nosenia ortézy objaví vyrážka, ortézu okamžite odstráňte. Ak by výskyt vyrážky pretrvával, kontaktujte svojho lekára.

Ak sa počas používania tejto pomôcky vyskytne bolesť, opuch, zmena citlivosti alebo iné neobvyklé reakcie, okamžite kontaktujte svojho lekára.

POKYNY NA NASADENIE:

- A. Rozopnite popruhy na priehlavku a členku. V sede si nasadte ortézu a zapnite remienok na priehlavku (č. 1), potom si omotajte a zapnite spodný remienok na členku (č. 2).
- B. Výstuže vytiahnite okolo päty (č. 3) smerom nahor až kým sa pohodlne nezapnú a nezaistia.
- C. Obtočte a upevnite horný remienok na členku (č. 4). V prípade potreby znovu pripevnite spodný remienok na členok.

ÚDRŽBA:

Perte ručne v studenej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne opláchnite a sušte na vzduchu.

Poznámka: Ak nie je ortéza dôkladne opláchnutá, môže zostávajúce mydo spôsobiť podráždenie a poškodiť materiál.

URČENÉ NA POUŽITIE LEN U JEDNÉHO PACIENTA

Datum posledního revize textu: 11. 1. 2021

© 2021, DJO, LLC

www.DJOGlobal.com

F +1760.734.4712

T +1760.727.1280

USA

Vista CA 92081-8553

1430 Decision Street

DJO, LLC



Germany
30175 Hannover
Schiffgraben 41

MMSS GmbH



Universal Ankle Brace

ORTÉZA HLEZENÍ PRO KONTROLU INVERZE/EVERZIE

ORTÉZA NA ČLENOK NA KONTROLU INVERZIE/EVERZIE



ZÁRUKA: DJO, LLC vykoná opravu alebo výmenu celého výrobku alebo jeho časti a jeho príslušenstva z dôvodu vady materiálu alebo spracovania po dobu šiestich mesiacov od dátumu predaja.

UPOZORNENIE: AJ KEĎ BOLA VENOVANÁ VŠETKA SNAHA NA ÚROVNI TECHNIKY DNEŠNEJ DOBY PRE ZÍSKANIE MAXIMÁLNEJ KOMPATIBILITY FUNKCIE, SILY, TRVANLIVOSTI A POHODLIA, TOTO ZARIADENIE JE LEN JEDNÝM ELEMENTOM V CELOM LIEČEBNOM PROGRAME PREVÁDZANOM ZDRAVOTNÍCKYM PROFESIONÁLOM. NEEEXISTUJE PRETO ZÁRUKA, ŽE BUDE PRI POUŽITÍ TOHTO PRODUKTU ZABRÁŇENÉ PORANENIU.

