


Datum poslední revize textu: duben 2019
www.DJGlobal.com
F +1760.734.4712
T +1760.727.1280
USA
Vista CA 92081-8653
1430 Decision Street

DJO, LLC

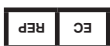

MSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



Surround® Gel Ankle

ORTÉZA HLEZENÍ PRO KONTROLU INVERZE/EVERZE



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TÉTO POMŮCKY SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ NASAZENÍ POMŮCKY JE NEZBYTNÉ PRO JEJÍ OPTIMÁLNÍ FUNKOVÁNÍ.

ZPŮSOB POUŽITÍ A INDIKACE:

- Ortéza pro podporu akutní i chronické nestability kotníku.

Poznámka: Doporučujeme nosit ortézu nasazenou přes pletený nebo tenké bavlněné ponožky.

KONTRAINDIKACE:

- Žádné kontraindikace nejsou známy.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Pokud se během používání této pomůcky objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obraťte na svého lékaře.

POKyny K NASAZENÍ:

1. Upravte a vycentrujte podložku paty: K vycentrování podložky paty použijte postranní pásky na obou stranách ortézy. Upravte podložku paty tak, aby ortéza těsně a pohodlně přiléhala k noze.
2. Přiložte výztuhy ke kotníku z obou stran a srovnejte je s osou končetiny. Pro zajištění správné polohy nohy zajistěte nejprve spodní pásek. Obujte a zavažte si botu.
3. Ztlačte z obou stran na gelové polštářky, čímž se tlak v polštářku rovnoměrně rozloží. Horní pásek omotejte kolem lýtky a zajistěte. Upravte oba pásky tak, aby ortéza pohodlně seděla. Ujistěte se, že výztuhy ortézy jsou umístěné přesně ve střední čáře kotníku a nohy. Pokud jsou pásky příliš dlouhé, je možné je zkrátit.
4. V případě potřeby je možné upravit podložku paty i po nasazení ortézy. Uchopte postranní pásky oběma rukama, patou tlačte na podložku a táhněte pásky směrem nahoru, dokud pata nebude pohodlně usazena na podložce.

LÉČBA S CHLAZENÍM KONČETINY:

- Vyjměte gelové polštářky z ortézy a dejte je na 2 hodiny do mrazáku.
- Dejte zmrazit POUZE gelový polštářek, nikoli celou ortézu.
- Vložte gelový polštářek zpět do ortézy a nasadte ortézu dle pokynů.

Poznámka: Před nasazením ortézy si oblečte ponožku, která dobře absorbuje.

ÚDRŽBA:

Perte ručně ve vlažné vodě s použitím jemného čistícího prostředku, důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU.

Poznámka: Pokud ortézu pečlivě neopláchnete, zbylé mýdlo může způsobit podráždění pokožky nebo poškození materiálu



TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE LATEX

URČENO K POUŽITÍ PRO JEDNOHO PACIENTA

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu části nebo celého výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu 24 měsíců od data prodeje.

OZNÁMENÍ: PŘESTOŽE BYLO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ FUNKČNOSTI, SILY, ODOLNOSTI A POKODLÍ VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ USILÍ A POUŽITÝ NEJMODERNĚJŠÍ DOSTUPNÉ METODY, NELZE ZARUČIT, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEDOJDE KE ZRANĚNÍ.

